

SIEHE VIDEO GEBRAUCH




GEBRAUCHSANWEISUNG

4GSafe


<http://www.plazur.fr/downloads/4GSANTE.MP4>

**A : den Sack schliessen.
Den Sack drehen &
aufrollen und zu einem
Knoten aufstecken.
Den Knoten im Loch einführen.**

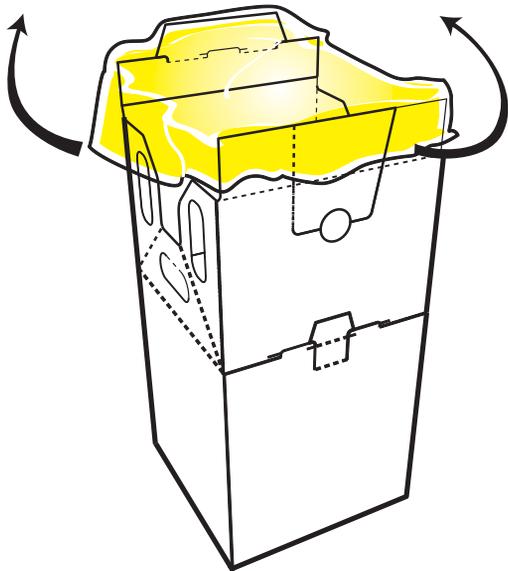


**B-1 : Die Seitengriffe nach Aussen
ausbreiten.**

**B-2 : Den Schutzschild - kleinere Klappe
umklappen um die infizierte Zone
zu isolieren.**

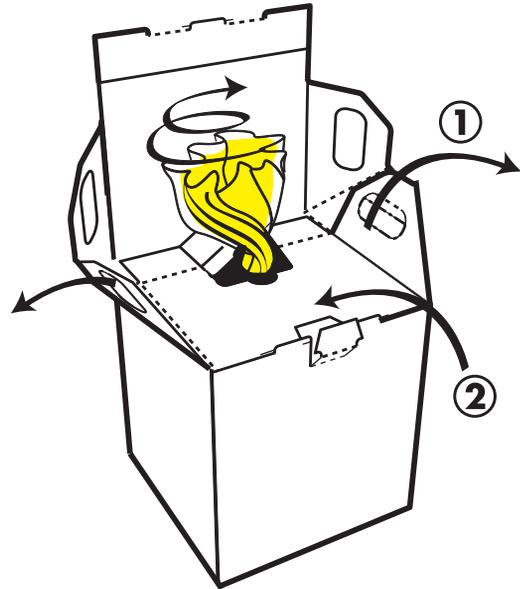

**C : Den Sack herunterdrücken
& die grössere Klappe
schliessen.**

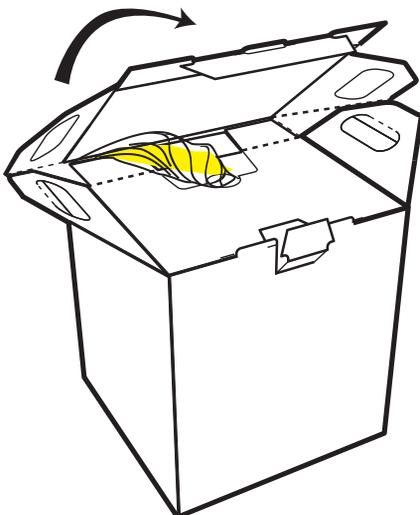

**D : Die Zunge einführen
(definitiver Verschluss).**

