

Mode d'emploi Pacazur®



VOIR LA VIDEO
D'UTILISATION


<http://www.pacazur.fr/downloads/PACAZUR.MP4>

DANGER


NE JAMAIS FORCER POUR L'INTRODUCTION DE DECHETS
DECHETS A ELIMINER CONFORMEMENT A LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR
RESPECTER LA LIMITE DE REMPLISSAGE - USAGE UNIQUE, NE PAS REUTILISER

MONTAGE

1) Poser le couvercle sur la cuve

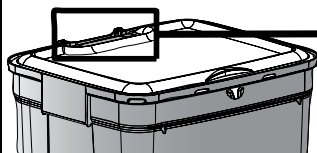

2) Clipser la charnière

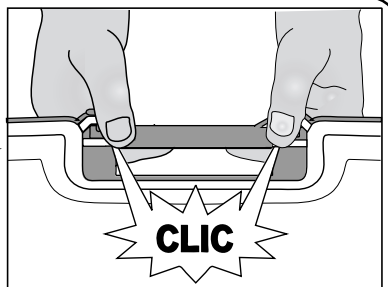

CHARIOTS




Montage : Poser le conteneur dans son emplacement, couvercle à plat monté. Lever le couvercle en position verticale et insérer la tringle dans la poignée.

Démontage : retirer la tringle, fermer définitivement le couvercle et extraire le fût.

FERMETURES PROVISOIRES

Couvercle plein

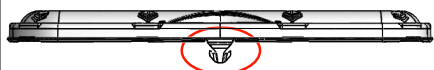

Fermeture provisoire:

Appuyer sur le couvercle au dessus de la languette et pincer les ailettes pour bloquer le dispositif.

Déverrouillage:


Rabattre les ailettes pour dégager la languette.

Couvercle avec obturateur

Position 0 : assemblage - appuyer sur l'obturateur en ∇ et 0 pour l'introduire



Position 1 : ouverture assistée par charnière

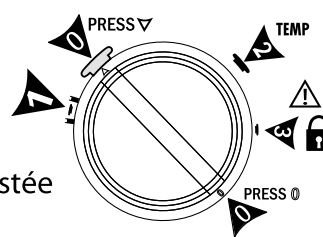

Position 2 : fermeture provisoire


Position 3 : fermeture définitive

FERMETURE DEFINITIVE

ATTENTION :


VEILLER A INTRODUIRE LA BORDURE DU COUVERCLE DANS TOUTE LA PERIPHERIE DE LA CUVE AVANT D'ACTIVER LES CLIPS, NOTAMMENT SI LA SECTION DU BAC A ETE DEFORMEE PAR LE REMPLISSAGE.

- veiller à ce qu'aucun objet ne sorte de la cuve,
- vérifier que les bordures du couvercle et de la cuve sont sèches pour garantir l'étanchéité du joint.

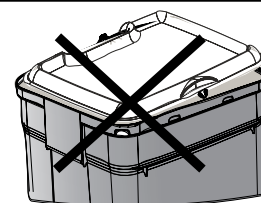


CLIPSAGE

Pincer la bordure du couvercle et de la cuve au niveau des 11 clips :

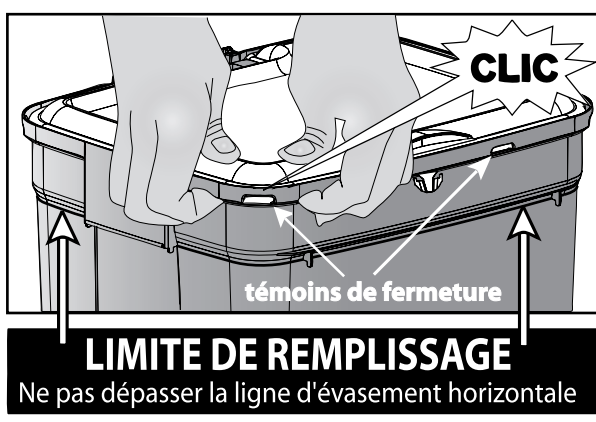

PRESERVEZ-VOUS DES TROUBLES MUSCULO-SQUELETTIQUES :

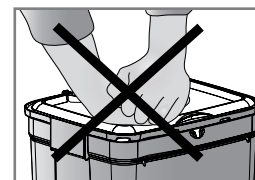

SEUL LE PINCEMENT DE L'EXTREMITE DE LA BORDURE AVEC LA CUVE PERMET DE FERMER LE CONTENEUR EFFICACEMENT ET SANS EFFORT.

Après utilisation, actionner le dispositif de fermeture définitive et vérifier le verrouillage conformément aux instructions du fabricant :
- **comptez les clics entendus lorsque vous fermez,**
- **l'activation d'un clip se contrôle sur le couvercle et/ou dans les trous de la bordure.**



Pacazur®

Conçu et fabriqué en France