




- ✓ **Montage sans effort**, par clipsage
- ✓ **Ouverture/fermeture ambidextre du volet par pression d'un doigt sur un bouton.** Système breveté
- ✓ **Verrouillage provisoire**
- ✓ **Fermeture définitive inviolable** par pression sur le volet - indicateurs de verrouillage
- ✓ **Large orifice d'introduction** : dépôt à plat des objets même volumineux, visualisation et optimisation du remplissage
- ✓ **Encoches de désolidarisation universelles** (aiguilles, stylos à insulines, lames de bistouri...)
- ✓ **Grande stabilité** : base large
- ✓ **Portabilité aisée** : poignée et formes ergonomiques
- ✓ **Support de fixation intégré** pour attacher la boîte à tout type d'objet. Système breveté



Pi5500 : boîtes de 5,5L pour Déchets d'Activités de Soins Perforants 3291

Conformes à la norme NF EN ISO 23907-1:2019

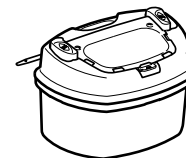

Picador®

Picador COLLECTEURS POUR DECHETS PERFORANTS

Fabriqués en polypropylène, les collecteurs  **Picador** sont conçus pour une sécurité d'utilisation maximale: pour éviter tout contact avec des zones infectées, le volet est activé d'un seul doigt par pression sur un bouton.

Conformité à la norme NF EN ISO 23907-1:2019 : perforation, étanchéité, chocs, résistance des poignées...

Homologuées pour le transport par route, fer et mer des matières infectieuses code ONU 3291 (ADR, RID ET IMDG)

Contrôle de fabrication attesté par le BVT garantissant une production selon les caractéristiques homologuées (ART.10 - 8 Arrêté TMD).

Conformité à l'Arrêté DGS du 24/11/2003 (SANP0324585A) modifié par par l'Arrêté du 20/11/2020 (NOR:SSAP2027334A)

Incinération sans risque d'émanations nocives. **Autoclavage** à 134°C.

Tous nos certificats et agréments sont remis avec nos offres et téléchargeables sur www.plazur.fr


Picador UTILISATION SIMPLE ET SECURISEE

1. Clipper le couvercle par pression sur l'arrière, un côté, l'avant puis l'autre côté
2. Si besoin, fixer la boîte à un support au moyen du lien intégré
3. Appuyer sur un des poussoirs pour ouvrir et rabattre le volet
4. Choisir une encoche de désolidarisation en fonction de l'instrument à éliminer (aiguilles, stylos à insuline, lame...)
5. Pour fermer provisoirement, presser l'avant du volet au niveau de la languette. Presser la languette pour le libérer
6. Pour fermer définitivement, appuyer sur chacune des 6 zones disposées sur l'avant, les côtés et l'arrière du volet

VOIR LA VIDEO D'UTILISATION



<http://www.plazur.fr/download/PICADOR.M4>

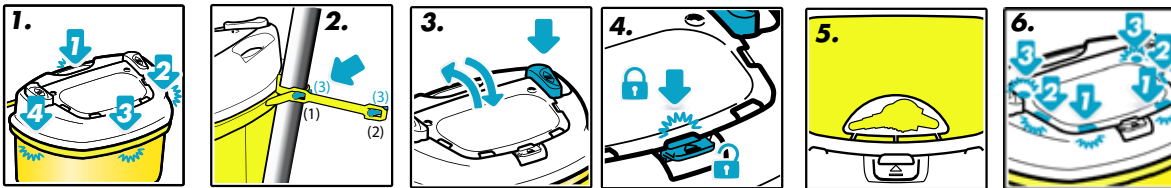

Caractéristiques techniques	Pi5500
Dimensions LxIxh (cm)	22,7 x 16 x 27
Ouverture (cm)	10 x 5,5
Poids (g)	359
Capacité réelle (L)	5,509
Capacité utile (L)	4,675
Homologation ADR	3H2/Y2.84/S/ - - F/BVT319110/PLAZUR
Masse Brute Maximale (kg)	2,84 kg
Conformité réglementaire	Conception et fabrication conformes à : - l'Arrêté DGS du 24/11/03 modifié (2020) - à la norme NF EN ISO 2390-1:2019 - à l'ADR / Arrêté TMD en vigueur
Marquage et mentions légales	- N° ONU 3291 et étiquette 6.2, - limite et vol. de remplissage (capacité utile), - mentions selon les normes ISO et NF - zone d'identification du producteur des déchets - dessins d'assemblage et de fermeture....
Conditionnement carton LxIxh (cm)	Carton 40 x 40 x 90
Quantité par carton	36
Poids du carton (kg)	13,6
Conditionnement palette LxIxh (cm)	Palette 80 x 120 x 200 12 cartons par palette
Quantité par palette	432
Poids de la palette (kg)	178

Version avril 2021. Reproduction totale ou partielle interdite sans autorisation expresse. Tous droits réservés. © 2021 PLAZUR S.A.


Plazur
PRESERVONS L'ESSENTIEL

CONCUS, FABRIQUES EN FRANCE
Marque déposée, Modèles brevetés

www.plazur.fr



Distributeur :

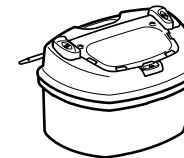

Picador®