




PICADOR KANÜLENBOXEN GEBRAUCHSANWEISUNG

Informationsblatt für die Verwender


I – BESCHREIBUNG

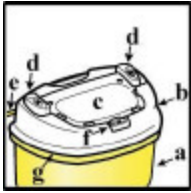


- a- Unterteil (Behälter)
- b- Deckel
- c- Verschlussklappe
- d- Druckknöpfe
- e- Kabelbinder
- f- Verriegelungszunge
- g- Füllgrenze

II – MONTAGE

Modelle 1,5L - 2,5L - 9L

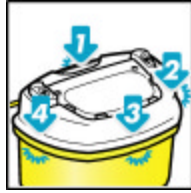

Modelle 3,5L - 5,5L - 7,5L

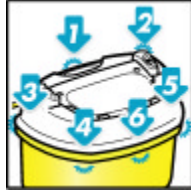


Die Box auf einem festen Untergrund stellen und den Deckel auf der Oberkante positionieren:

1- Positionierung: jeder Nocken (4 oder 6 gemäß Modell) im Oberrand einführen

2- Komplettes Einrasten: mit beiden Händen auf jeder Nocke fest drücken

→ *visuell überprüfen, daß alle Nocken korrekt eingerastet sind. die 4 oder 6 (je nach Modell) weiße Klips müssen hervorragen*

III – KABELBINDERBENUTZUNG

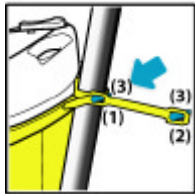


- 1- Der integrierter wiederverwendbarer Kabelbinder erlaubt es die Box auf verschiedene Stützen oder Trägern zu befestigen
- 2- Die Schlaufe auswählen, die sich an den Durchmesser der benutzten Stütze anpaßt (1) (2)
- 3- Das Kabel in Pfeilrichtung einfügen & die Zunge (3) ziehen um das Kabel zu blockieren
- 4- Auf der Verriegelungszunge drücken um die Box loszubinden

IV – BOXBENUTZUNG (mit Klappe und provisorischen Verschuß)

VORSICHT: die Fülllinie, die durch Pfeile gekennzeichnet ist, beachten (generell auf dem Niveau der Verbindung zwischen Unterteil und Deckel, außer Pi9000 – siehe Etikett)

Öffnung / Schließung der Klappe

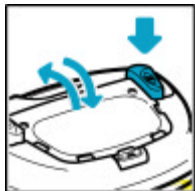

Auf einem der Druckknöpfe drücken um die Verschlussklappe zu öffnen oder schließen

→ Dank der Knöpfe werden Verletzungen und Verseuchungen vermieden


Provisorische Schließung



Ein leichter Druck auf der Verschlussklappe ausüben, in Höhe der Verriegelungszunge

→ Die Klappenöffnung an Hand der Knöpfe ist nicht mehr möglich


Freigabe der Schließung

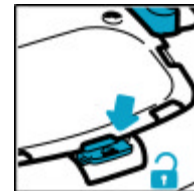

Verriegelungszunge eindrücken um die Klappe wieder frei zu geben


→ die Druckknöpfe sind wieder aktiviert

V – UNIVERSALE ABZIEHVORRICHTUNG

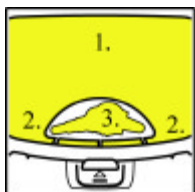

- 1- Breite Füllöffnung für umfangreiche Gegenstände (Skalpelle, komplette Spritzen, ...)
- 2- Abdrehvorrichtung zur Trennung von Kanülen und Nadeln von Spritzen
- 3- Abziehvorrichtung für Insulin-Füller oder Injektoren

VI – ENDGÜLTIGE SCHLIESSUNG

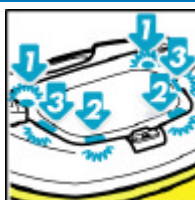

- 1- Die Klappe schliessen
 - 2- Die 6 Verschlusszonen, die auf der Klappe angeordnet sind, erkennen
 - 3- Auf jeder Zone fest drücken: hinten (1) starten, dann vorne (2) und schließlich in der Mitte (3)
- *überprüfen, daß die Schließungsindikatoren korrekt eingerastet worden sind.*

EMPFEHLUNGEN FÜR DIE RICHTIGE BENUTZUNG DER PICADOR KANÜLENBOXEN

Die Kanülenboxen aus Polypropylen sowie ihre Entsorgung sind für Ihre Einrichtung sehr kostspielig. Diese Boxen sind speziell für feste und scharfe infektiöse Abfälle geeignet, die einen mäßigen Risiko für die Gemeinschaft darstellen.

→ bitte sich auf die internen Abfallesortierungsplänen und auf den internationalen Normen (NF X 30-511 und DIN EN ISO 23907) beziehen.

Das Sicherheitsniveau kann durch eine schlechte Benutzung des Behälters beschädigt werden (zum Beispiel wenn die Box nicht korrekt geschlossen worden ist oder der Deckel nicht korrekt montiert).

Empfehlungen vor der Benutzung:

- Die Gebrauchsanweisung lesen, insbesondere für die Montage der Elementen und für die endgültige Schließung.
- Die Anweisungen für die Montage und die Benutzungsempfehlungen respektieren.
- Die Verpackung nur dann benutzen wenn sie gebrauchsfertig ist, d. h. wenn der Deckel auf der Box richtig montiert ist.
- Die Position der Greifzone und die Füllgrenze erkennen.
- Die Box auf einem Stützen-Träger dank des Kabelbinders befestigen um die Benutzung mit einer Hand zu gewährleisten.

Empfehlungen während der Benutzung:

- **Die Füllgrenze respektieren – sobald sie erreicht ist, die Box endgültig schließen.**
- Die Boxen außer Reichweite von Kindern halten.
- Sicherstellen, daß die provisorische Schließung nach jedem Gebrauch benutzt wird.
- Nie die Hand oder einen Teil der Hand in die Box einführen.
- Niemals die Abfälle mit Gewalt einführen.
- Die endgültige Schließung gemäß Gebrauchsanweisungen prüfen.
- Die Box niemals wiederöffnen.
- Die Boxen können während 18 Minuten auf 134°C vor der Benutzung autoklaviert werden. **Die Abfälle müssen gemäß Regelungen behandelt und entsorgt werden.**

Boxreferenz	NUTZINHALT [L]	MAX. BRUTO MASSE [kg]	AUßENMAß (L x l x h) [cm]
Pi0500			
Pi1500	1,15	1,00	18,5 x 13 x 12
Pi2500	2,13	1,38	18,5 x 13 x 20
Pi3500	2,80	1,86	22,7 x 16 x 16,8
Pi5500	4,68	2,84	22,7 x 16 x 27
Pi7500	6,38	3,83	22,7 x 16 x 39
Pi9000	7,50	4,75	18,5 x 13 x 64,5

BEDEUTUNG DER DATUMSSTEMPELN

Der Datumsstempel auf dem Kabelbinder der Box bezeichnet die Herstellungskalenderwoche im Jahr (52 Wochen pro Jahr).



z.B.: hier wurde die Box in der KW 29 hergestellt

→ : dieser Pfeil zeigt die Zehnerstelle der Wochennummer (also von 0 bis 5)

? : dieser Pfeil zeigt die Einheit der Wochennummer (also von 0 bis 9)

Die 2 Datumsstempeln auf der Deckelinnenseite bei den Druckknöpfen weisen das Herstellungs-Jahr und Monat an.



→ : Herstellungsmonatsnummer + Jahr (auf beiden Seiten des Pfeils)

BEDEUTUNG DER UN NUMMER



3H2/Y1/S/12/F/BVT319110/PLAZUR

3 ist das Behältertyp: hier Kanister

„H“ steht für das Material: = Kunststoff und „2“ für abnehmbarer Deckel

„Y“ steht für die die Verpackungsgruppe II + III

1 ist die maximale Bruttomasse in kg der Verpackung für feste Stoffe

„S“ bedeutet daß die Verpackung für feste Stoffe zugelassen ist

12 ist das Herstellungs-jahr

„F“ steht für Frankreich (Staat, wo das Behälter zugelassen worden ist)

BVT = Name des Laboratoriums, das die Box geprüft hat + Nummer der Zulassung

Hersteller

Die gravierte Markierung auf dem Behälterboden zeigt an, daß es sich um ein Modeltyp handelt, das erfolgreich die ADR Tests bestanden hat, und daß die Box mit dem Kapitel 6.1.3 der ADR, was mit der Boxherstellung (und nicht dem Gebrauch), übereinstimmt.