





- ✓ **Montage sans effort**, par clipsage
- ✓ **Ouverture/fermeture ambidextre du volet par pression d'un doigt sur un bouton.** Système breveté
- ✓ **Verrouillage provisoire**
- ✓ **Fermeture définitive inviolable** par pression sur le volet - indicateurs de verrouillage
- ✓ **Large orifice d'introduction** : dépôt à plat des objets même volumineux, visualisation et optimisation du remplissage
- ✓ **Encoches de désolidarisation universelles** (aiguilles, stylos à insulines, lames de bistouri...)
- ✓ **Grande stabilité** : base large
- ✓ **Portabilité aisée** : poignée et formes ergonomiques
- ✓ **Support de fixation intégré** pour attacher la boîte à tout type d'objet. Système breveté

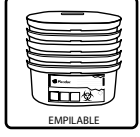

Pi1500 : boîtes de 1,5L pour Déchets d'Activités de Soins Perforants 3291

Conformes à la norme NF EN ISO 23907-1:2019

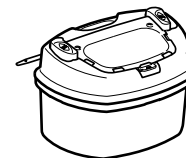

Picador®

Picador COLLECTEURS POUR DECHETS PERFORANTS

Fabriqués en polypropylène, les collecteurs  **Picador** sont conçus pour une sécurité d'utilisation maximale: pour éviter tout contact avec des zones infectées, le volet est activé d'un seul doigt par pression sur un bouton.

Conformité à la norme NF EN ISO 23907-1:2019 : perforation, étanchéité, chocs, résistance des poignées...

Homologuées pour le transport par route, fer et mer des matières infectieuses code ONU 3291 (ADR, RID ET IMDG)

Contrôle de fabrication attesté par le BVT garantissant une production selon les caractéristiques homologuées (ART.10 - 8 Arrêté TMD).


Conformité à l'Arrêté DGS du 24/11/2003 (SANP0324585A) modifié par par l'Arrêté du 20/11/2020 (NOR:SSAP2027334A)

Incinération sans risque d'émanations nocives. **Autoclavage** à 134°C.

Tous nos certificats et agréments sont remis avec nos offres et téléchargeables sur www.plazur.fr

Picador UTILISATION SIMPLE ET SECURISEE

1. Pré-insérer les ergots du couvercle dans la bordure puis presser sur chaque ergot
2. Au besoin, fixer la boîte à un support au moyen du lien intégré
3. Appuyer sur un des poussoirs pour ouvrir et rabattre le volet
4. Choisir une encoche de désolidarisation en fonction de l'instrument à éliminer (aiguilles, stylos à insuline, lame...)
5. Pour fermer provisoirement, presser l'avant du volet au niveau de la languette. Presser la languette pour le libérer
6. Pour fermer définitivement, appuyer sur chacune des 6 zones en commençant par l'arrière (1), puis l'avant (2) et enfin les côtés du volet (3)

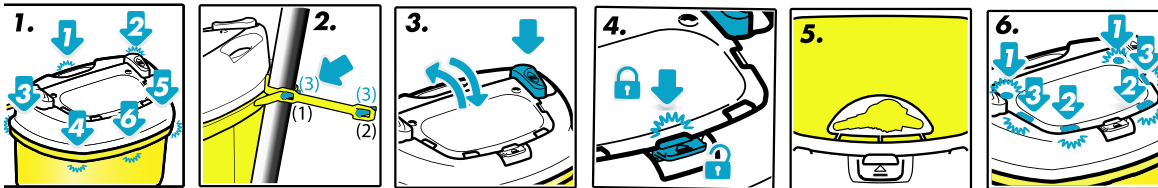

VOIR LA VIDEO D'UTILISATION



<http://www.plazur.fr/download/PICADOR.MPA>

Caractéristiques techniques		Pi1500
Dimensions Lxlxh (cm)	18,5 x 13 x 12	
Ouverture (cm)	10 x 5,5	
Poids (g)	194	
Capacité réelle (L)	1,51	
Capacité utile (L)	1,15	
Homologation ADR	3H2/Y1/S/ -- F/BVT31919/PLAZUR	
Masse Brute Maximale (kg)	1 kg	
Conformité réglementaire	Conception et fabrication conformes à : - l'Arrêté DGS du 24/11/03 modifié (2020) - à la norme NF EN ISO 23907-1:2019 - à l'ADR / Arrêté TMD en vigueur	
Marquage et mentions légales	- N° ONU 3291 et étiquette 6.2, - limite et vol. de remplissage (capacité utile), - mentions selon les normes ISO et NF - zone d'identification du producteur des déchets - dessins d'assemblage et de fermeture....	
Conditionnement carton Lxlxh (cm)	Carton 40 x 40 x 90	
Quantité par carton	60	
Poids du carton (kg)	12,2	
Conditionnement palette Lxlxh (cm)	Palette 80 x 120 x 200 12 cartons par palette	
Quantité par palette	720	
Poids de la palette (kg)	162	


Plazur
PRESERVONS L'ESSENTIEL

CONCUS, FABRIQUES EN FRANCE
Marque déposée, Modèles brevetés

www.plazur.fr



Distributeur :

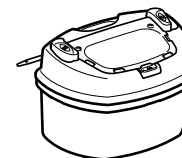

Picador®