





- ✓ **Einfache Montage**, ergonomische & nicht scharfkantige Formen
- ✓ **Öffnung/Schließung der Klappe mit einem Finger, mittels einer Taste** (patentiertes System)
- ✓ **Provisorischer Verschluss möglich**
- ✓ **Endgültige Schließung** durch Versenken der Klappe (Verriegelungsindikatoren)
- ✓ **Breite Einfüllöffnung für optimale Befüllung** zur Vermeidung vertikaler Schichtungen
- ✓ **Universale Abzieh-/Abdrehvorrichtungen** (Kanülen, Nadel, Lanzette...)
- ✓ **Hohe Stabilität** dank einem breiten Boden
- ✓ **Einfaches Tragen** dank eines Tragegriffes
- ✓ **Integrierte & wiederablösbare Kabelbinder aus PP** zur Befestigung an verschiedenen Stützträgern (patentiertes System)

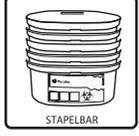

Pi2500DE: 2,5L Entsorgungsbox für scharfe und spitze Gegenstände 3291

Geprüft und zertifiziert nach europäischer Norm EN ISO 23907-1:2019

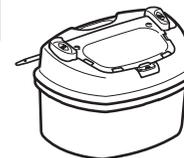

Picador®

Picador KANÜLENBOXEN FÜR SPITZE GEGENSTÄNDE

Die Polypropylen  **Picador** Boxen wurden für eine optimale Sicherheit entwickelt: beim einfachen Drücken eines vom Verschlusssystem unabhängigen Druckknopfes wird die Verschlussklappe automatisch geöffnet und/oder verschlossen.

Erfüllen die Kriterien der 4.2.5 der BGR/TRBA 250

Entsprechen der Norm EN ISO 23907: Durchstoßfestigkeit, Bruchfestigkeit, Dichtheit...

UN-Zulassung zur Beförderung klinischer Abfällen UN3291 gemäss ADR, RID & IMDG und GGVSEB.

Herstellungskontrolle, wodurch eine Serienproduktion gemäß den zugelassenen Eigenschaften gewährleistet wird.

Verbrennung ohne schädliche Emissionen.

Autoklavierbar bis 134°C.

Unsere Broschüre & Zertifikate sind per Mausklick auf unseren Preislisten herunterladbar.






VIDEO GEBRAUCH



<http://www.plazur.fr/downloads/PICADOR.MP4>

Picador EINFACHE UND SICHERE BENUTZUNG

1. Jeden Nocken des Deckels in der Umrandung des Behälters positionieren und auf jedem Klipp drücken.
2. Im Notfall die Box an einem Stützträger mittels des integrierten Kabelbinders befestigen.
3. Auf einen der Drücker um die Verschlussklappe zu öffnen oder zu schließen drücken.
4. Zur provisorischen Schließung, auf die Verschlussklappe in Höhe der Verriegelungszunge drücken. Zur Wiederöffnung die Zunge drücken.
5. Eine Abziehvorrichtung wählen.
6. Zur definitiven Schließung, auf jede der 6 Verschlusszonen drücken: zuerst die 2 Hinteren (1), dann die 2 Vorderen(2) und endlich die 2 Mittleren (3).

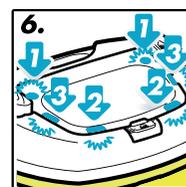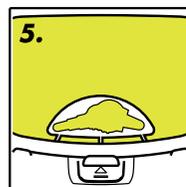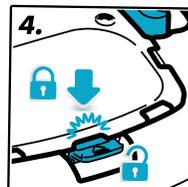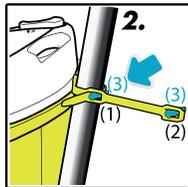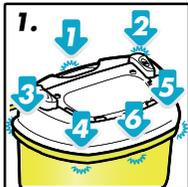

Technische Daten	Pi2500DE
Außenmaß LxBxH (cm)	18.5 x 13 x 20
Einfüllöffnung (cm)	10 x 5.5
Gewicht (g)	246
Kapazität (L)	2.511
Inhalt zur Befüllgrenze (L)	2.125
UN-Zulassungsnummer	3H2/Y1.4/S/ - - F/BVT31919/PLAZUR
Genehmigtes Gewicht (kg)	1.40 Kg
Konformität	Design und Prüfung nach: - Norm EN ISO 23907 - und ADR UN3291
Bezeichnung (auf Anfrage)	- Befüllgrenze, - UN-Nummer UN3291 - Markierung gemäss EN ISO 23907, - Identifizierungszone für Abfallhersteller, - Gebrauchsanweisungen....
Verpackung Karton LxBxH	Karton 40 x 40 x 90
Stück / Karton	60
Gewicht des Kartons (kg)	15
Verpackung Palette LxBxH	Palette 80 x 120 x 240 14 Kartons pro Palette
Stück / Palette	840
Gewicht der Palette (kg)	225

Stand Juni 2016 - Reproduktion ganz oder teilweise ist ohne schriftliche Genehmigung untersagt - Alle Rechte vorbehalten - © 2016 PLAZUR S.A.

Plazur


GEMEINSAM DAS WESENTLICHE SCHÜTZEN

ENTWORFEN, HERGESTELLT IN FRANKREICH
Eingetragene Schutzmarke, Gebrauchsmuster

www.plazur.fr



Verteiler :

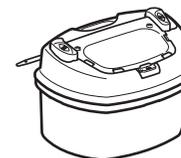

Picador®